

## INFORMAČNÍ LETÁK

Aloclair Gel s výtažkem z aloe vera působí mechanicky. Zajišťuje úlevu od bolesti tím, že přilne k povrchu sliznice a chrání tak poranění před dalším drážděním.

### INDIKACE

Aftózní vřidky, aftózní stomatitida, drobná poranění v ústech, včetně poranění způsobených rovnátky nebo špatně sedícím umělým chrupem.

### SLOŽENÍ

Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenovaný ricinový olej, xantanová guma, sorban draselný, benzoát sodný, benzalkonium chlorid, aroma, EDTA, sacharin sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrrhetinová, aloe barbadensis.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poranění v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po dobu alespoň 2 minut. Po každém použití zavřete víčko. Použijte 3-4 krát denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte ani nepijte.

### KONTRAINDIKACE

Aloclair Gel nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku.

### VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojové teploty. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Aloclair® je obchodní značka společnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

#### **Výrobce:**

Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.

#### **Distributor v ČR:**

Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika