

AloclairTM gél

INFORMAČNÝ LETÁK

Aloclair Gel obsahuje výťažok z aloe vera a má mechanický účinok. Zmierňuje bolesť tým, že vytvára na sliznici v ústach film, ktorým chráni poškodenú sliznicu pred ďalším dráždením.

INDIKÁCIE

Afty, aftózna stomatitída, malé rany, vrátane poranení spôsobených zubnými strojčekmi alebo zle sediacimi zubnými protézami.

ZLOŽENIE

Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenizovaný ricínový olej, xantánová guma, sorbát draselný, benzoát sodný, benzalkónium chlorid, aróma, EDTA, sacharín sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrrhizinová, aloe barbadensis.

SPÔSOB POUŽITIA

Naneste 1 alebo 2 kvapky gélu tak, aby bol pokrytý celý pľuzgier alebo poranené miesto. Zabráňte priamemu styku aplikátora s ranou. Minimálne 2 minúty sa rany nedotýkajte ani jazykom, aby sa mohol vytvoriť ochranný film. Po každom použití kryt zatvorte. Aplikujte 3-4 razy denne alebo podľa potreby. Po každej aplikácii nejedzte a nepite aspoň jednu hodinu.

KONTRAINDIKÁCIE

Prípravok Aloclair Gél nesmú užívať pacienti so zvýšenou precitlivosťou na niektorú zložku prípravku.

VAROVANIE A UPOZORNENIE

Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Aloclair® je ochranná známka spoločnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

Výrobca:

Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.

Spinomocnený zástupca v SR:

Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika

